


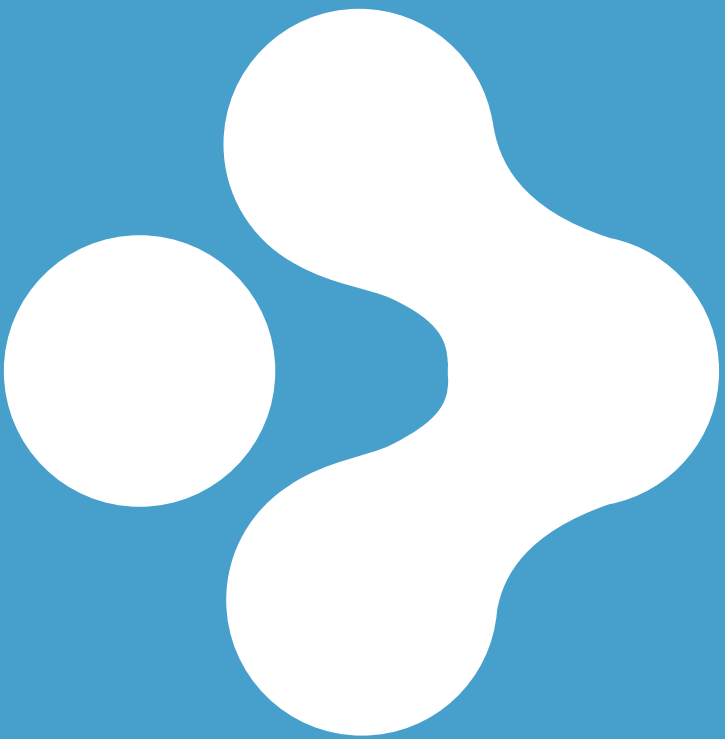

TERAPIA FOTOBIODINÁMICA


TERAPIA FOTOBIODINÁMICA

La terapia fotobiodinámica es el último milagro de la estética. Una revolucionaria técnica no invasiva basada en la estimulación, regeneración y reparación de la piel a partir de la combinación del dispositivo **Fotoage** y los productos **Skinox**.


Accesible, sencilla, sin dolor, sin efectos secundarios y con excelentes resultados.



¿Cómo funciona?

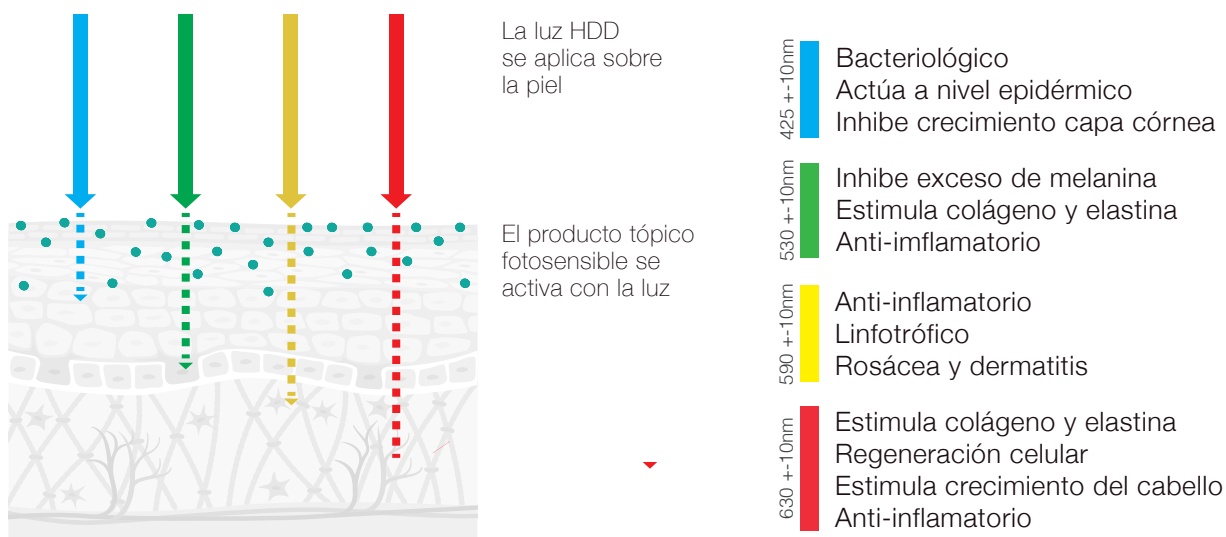


¿Qué indicaciones puede tratar?

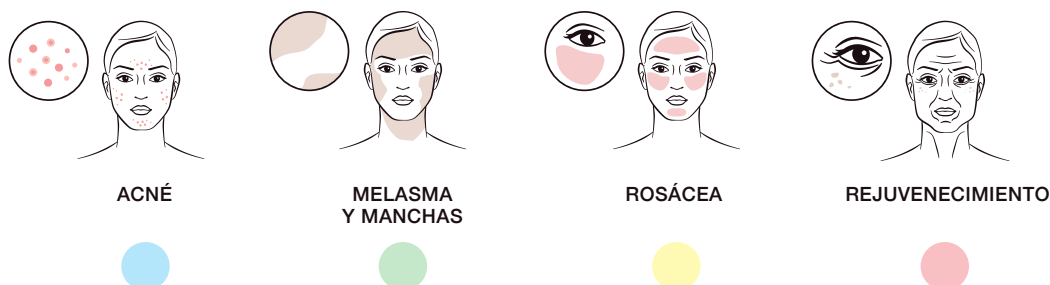

TECNOLOGÍA HDD

HDD o High Density Diode (diodo de alta densidad) es una luz mucho más potente en comparación con el LED, que puede concentrar una mayor cantidad de energía en un área más grande. También es capaz de emitir luz monocromática pura. Por estas razones es más efectivo que otros tipos de tratamiento de cromoterapia.

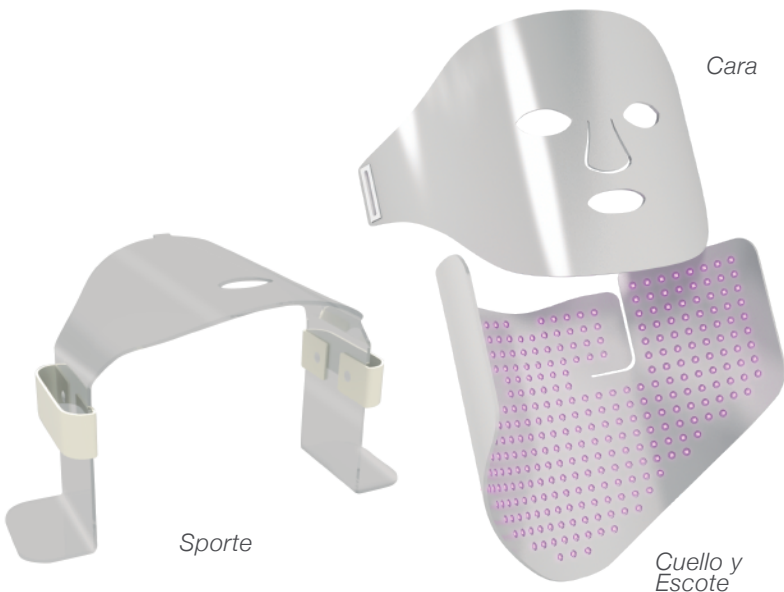

Indicaciones

- ✓ Tratamientos coadyuvantes
- ✓ Post Carboxiterapia
- ✓ Post quemaduras solares
- ✓ Despigmentante
- ✓ Antiinflamatorio
- ✓ Terapia fotodinámica
- ✓ Rosácea
- ✓ Post Peeling
- ✓ Post Láser
- ✓ Cicatrices
- ✓ Acné
- ✓ Post IPL

Características técnicas Fotoage

Programas:

- E. Pulsada a 73 Hz (Fr. B de Nogier)
- E. Pulsada a 73 Hz (Fr. B de Nogier)
- E. Pulsada a 73 Hz (Fr. B de Nogier)
- E. Pulsada a 584 Hz (Fr. B de Nogier)

Rojo: l.o. 630 +-10nm
Amarillo: l.o. 590 +-10nm
Verde: l.o. 530 +-10nm
Azul: l.o. 425 +-10nm

Total 2.248 diodos monocromáticos
562 diodos cuatricolor desfocalizados
Facial 924 | Cuello y Escote 1.540

skinox.

TECNOLOGÍA VYTRUS

SKYMEDIC trabaja con Vytrus Biotech, un laboratorio con más de 40 años de experiencia especializado en el desarrollo y producción de ingredientes activos de alto valor agregado a partir de la tecnología de las células madre vegetales obtenidas de forma sostenible.

BIOFACTORES CELULARES. Las plantas tienen un conjunto de células totipotentes (células madre vegetales) que pueden reparar cualquier tejido dañado. Una planta completa y funcional puede regenerarse a partir de una única célula totipotente si se cultiva en condiciones apropiadas. Así se obtiene el callo, y con esto Skymedic puede trabajar con la materia prima liofilizada, consiguiendo una pureza mayor que la de cualquier otra empresa.



skinox. Wrinkles

Promueve la neocogénesis y mejora significativamente el daño producido por el fotoenvejecimiento.

tratamiento en clinica

fase 1 Peeling pH: 2.0-3.0

Materia prima

Ácido Glicólico 20%
Ácido Ferúlico 3%
Ácido Mandélico 10%
Ácido Láctico 4.5%
Ácido Salicílico 2%
Ácido Cítrico 1%
Ácido Kójico 1%

Función

Queratoítico
Hidrata la piel / Estimula el fibroblasto
Despigmentante
Queratoítico
Estimula el fibroblasto
Bactericida
Inhibe la Tirosinasa



Protocolo: Limpiar la piel para desengrasar. Este paso es imprescindible para optimizar la acción del peeling. Aplicar a continuación una dosis de 4 ml aproximadamente de Peeling Wrinkles distribuida en la cara, el cuello y el escote. Dejar durante 3 minutos. Si el paciente tiene la piel muy sensible dejar menos tiempo. Neutralizar con agua y retirar.

Técnica de aplicación: Se recomienda especialmente la aplicación con pincel de abanico debido a la textura gel del peeling.

fase 2 Serum fotodinámico

Materia prima

Acido Hialuronico HW 0.5%
Acido Hialuronico LW 0.4%
Oro Coloidal 2%
ALA 0.1%
Centella Reversa 3%
Matrixyl 2%
Argirelox 10%

Función

Hidratación superficial y efecto Flash
Hidratación profunda y efecto plumping
Fotodinamizante. Efecto antiaging
Fotodinamizante. Efecto antiaging
Revierde el envejecimiento
Estimulación del fibroblasto
Efecto tensor-botox



Protocolo: Aplicar Serum fotodinámico Wrinkles. Extender una dosis de 1 ml en la cara y 1,5 ml el cuello y el escote. Colocar lámina de plástico protectora (papel feel) y oclusiva en la cara, cuello y escote. Dejar 10 minutos en oscuridad sin retirar.

fase 3 Fotoage

Protocolo: Colocar la máscara FOTOAGE sobre el protector de plástico y seleccionar el programa de emisión de COLOR ROJO. Dejar que los diodos FOTOAGE actúen durante 15 minutos (el programa es automático y se apagará cuando termine). Retirar FOTOAGE y plástico, limpiar Producto de Fase 2. Aplicar protección solar para terminar el tratamiento.

tratamiento domiciliario

fase 4 FOTOSKINOX® SPF 50+

Materia prima	Función
Filtros Químicos Liposomados 15%	Absorbe la radiación solar y la neutraliza
Dioxido De Titanio 3%	Genera una película protectora en la piel
Elix-ir 2%	Protección frente al infrarrojo
Exo P 2%	Protección ante contaminación ambiental
Delisens 0.1%	Protector rayos ultravioleta
Arabiam Cotton 0.5%	Fotoprotector / Antioxidante



fase 5 HYALUROX® Serum

Materia prima	Función
Oro 0.075%	Efecto antiaging
Acido Hialuronico LW 0.1%	Hidratación
Matrixyl 2%	Estimulación de colágeno
Nicotinamida 1%	Combate radicales libres / Antioxidante
Argirelox 10%	Efecto tensor - botox
AH Crosslinkado 2%	Hidratación duradera / Evita contaminantes
Ascorbyl Glucosido 2%	Genera Vitamina C
Turmeria Zen 2%	Antiinflamatorio / Regenerante
Centella Reversa 2%	Estimulación de colágeno
Arabian Cotton 2%	Antioxidante



Protocolo 1 mes de tratamiento: Aplicar Hyalurox Serum y Fotoskinox SPF 50+ dos veces al día: por la mañana y por la tarde.



skinox. Blemish

Favorece la eliminación de imperfecciones en pieles propensas al acné.

tratamiento en clinica

fase 1 Peeling pH: 2.0-3.0

Materia prima	Función
Ácido Azelaico 10%	Bactericida
Ácido Mandelico 10%	Estimulación del fibroblasto
Ácido Salicílico 10%	Bactericida

Protocolo: Limpiar la piel para desengrasar. Este paso es imprescindible para optimizar la acción del peeling. Aplicar a continuación una dosis de 4 ml aproximadamente de Peeling Blemish distribuida en la cara, el cuello y el escote. Dejar durante 3 minutos. Si el paciente tiene la piel muy sensible dejar menos tiempo. Neutralizar con agua y retirar.

Técnica de aplicación: Se recomienda especialmente la aplicación con pincel de abanico debido a la textura gel del peeling.



fase 2 Serum fotodinámico

Materia prima	Función
Acido Hialuronico LW 0.5%	Hidratación superficial y efecto Flash
Acido Hialuronico HW 0.3%	Hidratación profunda y efecto plumping
Extracto Tepezcohuite 5%	Antibacteriano
ALA 0.1%	Fotodinamizante. Bactericida
Turmeria Zen 2%	Antiinflamatorio / Regenerante
Quora Noni 2%	Inhibición macrobiótica

Protocolo: Aplicar Serum fotodinámico Blemish. Extender una dosis de 1 ml en la cara y 1,5 ml el cuello y el escote. Colocar lámina de plástico protectora (papel feel) y oclusiva en la cara, cuello y escote. Dejar 10 minutos en oscuridad sin retirar.



fase 3 Fotoage

Protocolo: Colocar la máscara FOTOAGE sobre el protector de plástico y seleccionar el programa de emisión de COLOR AZUL. Dejar que los diodos FOTOAGE actúen durante 15 minutos (el programa es automático y se apagará cuando termine). Retirar FOTOAGE y plástico, limpiar Producto de Fase 2. Aplicar protección solar para terminar el tratamiento.

tratamiento domiciliario

fase 4 Espuma limpiadora

Materia prima

Turmeria Zen 0.5%
Quora Noni 0.5%
Ácido Salicílico 0.5%

Función

Antiinflamatorio / Regenerante
Inhibición macrobiótica
Bactericida / Limpieza profunda



fase 5 Home Care Serum

Materia prima

Extracto De Tepezcohuite 5%
Cytobiol Bardane 1%
Hyalosome EG-10 2%
Turmeria Zen 2%
Quora Noni 2%

Función

Antibacteriano
Bactericida
Hidratación. AH Reticulado
Antiinflamatorio / Regenerante
Inhibición macrobiótica



Protocolo 1 mes de tratamiento: Aplicar Cleansing Soap (Espuma limpiadora) (1ml) dos veces al día: por la mañana y por la noche. Retirar con agua y secar. Aplicar el Serum Blemish (1ml) dos veces al día: por la mañana y por la noche.



skinox. Dark Spots

Promueve el blanqueamiento y trabaja en la corrección de hiperpigmentaciones cutáneas.

tratamiento en clinica

fase 1 Peeling pH: 2.3-3.3

Materia prima

Ácido Glicólico 7%
 Ácido Kójico 5%
 Ácido Mandélico 10%
 Ácido Salicílico 2%
 Ácido Fítico 10%
 Ácido Tranhexámico 5%

Función

Queratolítico
 Inhibe la Tirosinasa
 Estimula el fibroblasto / Queratolítico
 Bactericida
 Queratolítico
 Inhibe la Tirosinasa



Protocolo: Limpiar la piel para desengrasar. Este paso es imprescindible para optimizar la acción del peeling. Aplicar a continuación una dosis de 4 ml aproximadamente de Peeling Dark Spots distribuida en la cara, el cuello y el escote. Dejar durante 3 minutos. Si el paciente tiene la piel muy sensible dejar menos tiempo. Neutralizar con agua y retirar.

Técnica de aplicación: Se recomienda especialmente la aplicación con pincel de abanico debido a la textura gel del peeling.

fase 2 Serum fotodinámico

Materia Prima

Ácido Hialuronico LW 0.5%
 Ácido Hialuronico HW 0.3%
 Nicotinimida 1%
 Albatin 0.1%
 Melanostatine 4%
 Tyrostat 2%
 Acido Tranhexámico 2%
 Oro Coloidal 2%
 Luminia Granatum 1%

Función

Hidratación superficial y efecto Flash
 Hidratación profunda y efecto plumping
 Antioxidante / Inhibidor de tiroxina
 Inhibe la tirosinasa
 Bloquea la tirosinasa
 Bloquea la formación de melanina
 Bloquea la tirosinasa
 Fotodinamizante. Efecto antiaging
 Antioxidante y antiinflamatorio



Protocolo: Aplicar Serum fotodinámico Dark Spots. Extender una dosis de 1 ml en la cara y 1,5 ml el cuello y el escote. Colocar lámina de plástico protectora (papel feel) y oclusiva en la cara, cuello y escote. Dejar 10 minutos sin retirar.

fase 3 Fotoage

Protocolo: Colocar la máscara FOTOAGE sobre el protector de plástico y seleccionar el programa de emisión de COLOR VERDE. Dejar que los diodos FOTOAGE actúen durante 15 minutos (el programa es automático y se apagará cuando termine). Retirar FOTOAGE y plástico, limpiar Producto de Fase 2.

fase 4 Mascarilla despigmentante

Materia Prima	Función
Ácido Azelaico 15%	Queratolítico
Ácido Ferúlico 5%	Antioxidante / Neutraliza radicales libre
Ácido Kójico 5%	Despigmentante
Ácido Salicílico 2%	Bactericida / Limpieza en profundidad
Ácido Fítico 1%	Queratolítico
Arbutina 5%	Inhibe la tiroxinasa
Albatin 0.1%	Inhibe la tiroxinasa
Kopcinol 2%	Inhibe la tiroxinasa
Melanostatine 4%	Bloquea la tiroxinasa
Tyrostat 2%	Bloquea la formación de melanina
Ácido Tranhexámico 5%	Inhibe la Tiroxinasa
Turmeria Zen 2%	Antiinflamatorio / Regenerante
Arabian Cotton 2%	Fotoprotector / Antioxidante
Luminia Granatum 1%	Antioxidante / Antiinflamatorio



Protocolo: Aplicar Mascarilla (3ml) en consulta y dejarlo actuar mínimo 30 min máximo 8 horas. El paciente se lo puede retirar con agua en el domicilio.

tratamiento domiciliario

fase 5 FOTOSKINOX® SPF 50+

Materia prima	Función
Filtros Quimicos Liposomados 15%	Absorbe la radiación solar y la neutraliza
Dioxido De Titanio 3%	Genera una pelicula protectora en la piel
Elix-ir 2%	Protección frente al infrarrojo
Exo P 2%	Protección ante contaminación ambiental
Delisens 0.1%	Protector rayos ultravioleta
Arabiam Cotton 0.5%	Fotoprotector / Antioxidante



fase 6 FOTOSKINOX® Serum

Materia prima	Función
Nicotinamida 1%	Antioxidante / Inhibidor de la Tiroxina
Albatin 1%	Inhibe la tiroxinasa
Melanostatine 4%	Bloquea la Tiroxinasa
Tyrostat 2%	Bloquea la formación de melanina
Ácido Hialurónico Crosslinkado 2%	Hidratación duradera / Evitar contaminantes
Ácido Tranhexámico 5%	Inhibe la Tiroxinasa
Luminia Granatum 0.5%	Antioxidante / Antiinflamatorio



Protocolo 1 mes de tratamiento: Aplicar Fotoskinox Serum y Fotoskinox SPF 50+ dos veces al día: por la mañana y por la tarde.



skinox. Redness

Combate el enrojecimiento de la piel y alivia la irritación, rosácea y dermatitis.

tratamiento en clinica

fase 1 Peeling pH: 1.7-2.7

Materia prima	Función
Ácido Azelaico 15%	Queratolítico
Ácido Mandélico 5%	Estimula el fibroblasto / Queratolítico
Ácido Fítico 5%	Queratolítico
Ácido Láctico 5%	Inhibe la Tirosinasa

Protocolo: Limpiar la piel para desengrasar. Este paso es imprescindible para optimizar la acción del peeling. Aplicar a continuación una dosis de 4 ml aproximadamente de Peeling Redness distribuida en la cara, el cuello y el escote.

Dejar durante 3 minutos. Si el paciente tiene la piel muy sensible dejar menos tiempo. Neutralizar con agua y retirar.

Técnica de aplicación: Se recomienda especialmente la aplicación con pincel de abanico debido a la textura gel del peeling.



fase 2 Serum fotodinámico

Materia prima	Función
Ácido Hialurónico LW 0.5%	Hidratación superficial y efecto Flash
Ácido Hialurónico HW 0.3%	Hidratación profunda y efecto plumping
Plata Coloidal 0.2%	Fotodinamizante. Rejuvenecimiento
Melatonina 0.01%	Activación celular
Coralline P 3%	Aporta oxígeno a las células
Azeloglicina 5%	Bactericida e hidratante
Arabian Cotton 2%	Antioxidante

Protocolo: Aplicar Serum fotodinámico Redness. Extender una dosis de 1 ml en la cara y 1,5 ml el cuello y el escote. Colocar lámina de plástico protectora (papel feel) y oclusiva en la cara, cuello y escote. Dejar 10 minutos sin retirar.



fase 3 Fotoage

Protocolo: Colocar la máscara FOTOAGE sobre el protector de plástico y seleccionar el programa de emisión de COLOR AMARILLO. Dejar que los diodos FOTOAGE actúen durante 15 minutos (el programa es automático y se apagará cuando termine). Retirar FOTOAGE y plástico, limpiar Producto de Fase 2. Aplicar protección solar para terminar el tratamiento.

tratamiento domiciliario

fase 4 FOTOSKINOX® SPF 50+

Materia prima

Filtros Químicos Liposomados 15%
Dioxido De Titanio 3%
Elix-ir 2%
Exo P 2%
Delisens 0.1%
Arabiam Cotton 0.5%

Función

Absorbe la radiación solar y la neutraliza
Genera una película protectora en la piel
Protección frente al infrarrojo
Protección ante contaminación ambiental
Protector rayos ultravioleta
Fotoprotector / Antioxidante



fase 5 Home Care Serum

Materia prima

Ácido Hialurónico LW 0.5%
Ácido Hialurónico Crosslinkado 2%
Melatonina 0.01%
Coralline P 3%
Azeloglicina 5%
Arabian Cotton 2%

Función

Hidratación
Hidratación duradera / Evitar contaminantes
Activación celular
Aporta oxígeno a las células
Bactericida e hidratante
Antioxidante



Protocolo 1 mes de tratamiento: Aplicar Redness Home Care Serum y Fotoskinox SPF 50+ dos veces al día: por la mañana y por la tarde.





Isaac Peral, 91
08224 Terrassa, Barcelona
+34 937 426 424
info@skymedic.eu

www.skymedic.eu