



ZUPRA
ZUPRA
ZUPRA
ZUPRA

TECNOLOGÍA MMP

TRATAMIENTO AUXILIAR PARA LA CAÍDA DE CABELLO



Microinfusión

Permite la aplicación de activos sobre la zona a tratar por vía subcutánea.



Resultados efectivos

Los productos aplicados con MMP suelen ser más precisos y uniformes.



Cuidado capilar

Ideal para el tratamiento de diversos problemas del pelo y la piel cabelluda.

Acerca de MMP

Una técnica que permite introducir de forma más directa y precisa los cosmecéuticos y sustancias terapéuticas en la zona de aplicación en el cuero cabelludo para tratar caída y temas de alopecia.



Alopecia y caída capilar



Envejecimiento capilar



Cabello fino y débil



Ideal para hombres y mujeres


EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA MEDIANTE UN DISPOSITIVO DE MICROPUNCIÓN - ZUPRA.

¿COMO SE REALIZA?

- Colocar el cartucho de agujas en el equipo.
- Ajustar la energía del equipo a 7 volts.
- Dar dos giros a la base del equipo donde se insertó el cartucho y verificar con regla que sea la salida de las agujas 2mm.
- Las agujas se sumergen con los activos que se aplicarán, previamente depositados en el empaque del cartucho a utilizar.
- Los activos se deberán aplicar en movimientos circulares, de ida y vuelta, para lograr que penetren en el tejido con una profundidad y velocidad controlada.
- Con este movimiento se logran depositar los cosmecéuticos para dar paso a su penetración y que actúen sobre los folículos pilosos o la dermis, con una acción más directa.

PRINCIPALES VENTAJAS DE USAR LA TECNOLOGIA MMP

- ① Aumenta la absorción del medicamento.,
- ② Favorece la formación de colágeno y elastina.
- ③ Estimula los factores de crecimiento de las plaquetas de la sangre.
- ④ Permite un tratamiento uniforme y preciso.

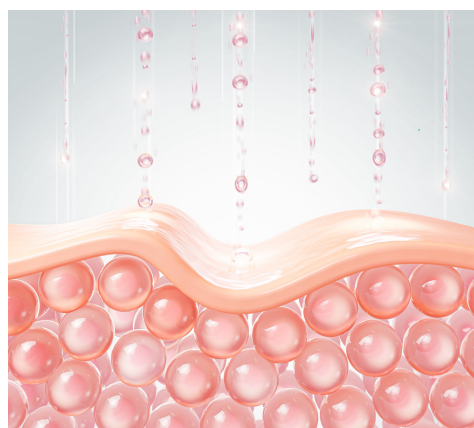

¿QUÉ MEDICAMENTOS SE PUEDEN APLICAR?

- Duta Ox ● Bica Ox ● Deep Serum ● Meso Ox ● Vitaminas



→ Alopecia androgenética

→ Alopecia areata

→ Efluvio Telógeno

→ Caspa y seborrea

→ Cabello fino y poco denso

**PROBLEMAS QUE
SE PUEDEN
TRATAR**

FRECUENCIA DE LAS SESIONES

El número de sesiones dependerá de la zona a tratar y de las particularidades de cada paciente.

Sin embargo, la tecnología MMP no impide que los pacientes realicen sus actividades rutinarias el mismo día del procedimiento, siguiendo las indicaciones post- tratamiento señaladas por su médico.



CONTRAINDICACIONES

- Embarazo
- Lactancia
- Enfermedades cutáneas activas
- Infecciones localizadas
- Tratamientos previos (menos de 6 meses).

PRECAUCIONES PREVIAS

- No tomar AINE'S (5 días previos al tratamiento)
- No ir al gimnasio o hacer ejercicio
- No acudir a saunas, ni piscina (hasta un día después del tratamiento).

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Reacciones alérgicas a la sustancia empleada (por lo general son leves, que disminuyen con el tratamiento adecuado o incluso sin él), hematomas, edemas o inflamación que remitirán generalmente en poco tiempo sin necesidad de ser tratados.

Puede darse el caso de caída de pelo de forma temporal, debido al estrés generado por la inflamación de la piel en el cuero cabelludo, pero al poco tiempo empezará a crecer nuevamente.